




# הוראות מקוצרות

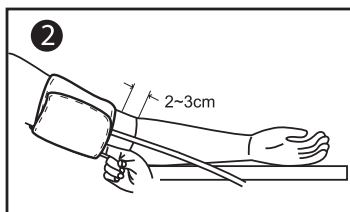


הלבש את השרוולית על הזרוע. הקפד שחלקה התחתון של השרוולית יהיה במרחק של 2-3 ס"מ מעל המרפק

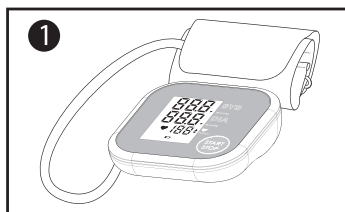

חבר את מחבר האוויר שבקצה צינורית השרוולית למקומו המיועד במכשיר

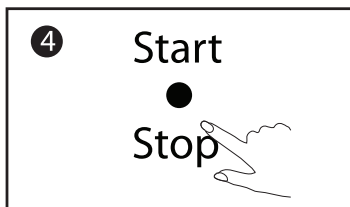


לחץ על כפתור ההפעלה, אל תזוז ואל תדבר בזמן המדידה והמתן בסבלנות עד לקבלת תוצאות המדידה

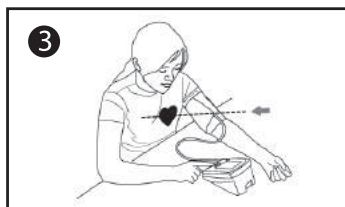


שב זקוף בכיסא, השתדל להיות רגוע ונינוח ככל האפשר למשך דקה לפחות


# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

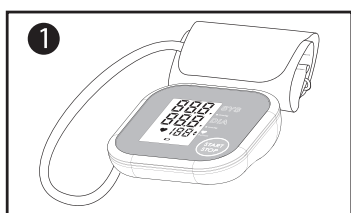


Присоедините манжету к трубке и аппарату

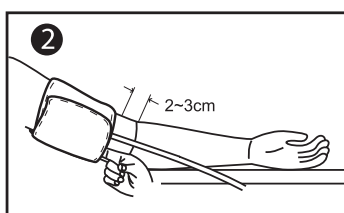

Наденьте манжету на руку. Край манжеты должен быть выше локтя на 2-3 см.

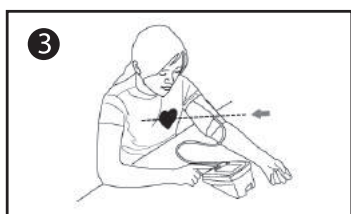

Сядьте удобно на стул перед столом и расслабьтесь на 1-2 минуты

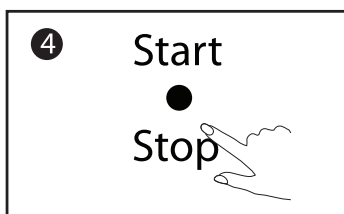

Нажмите на кнопку «Start». Постарайтесь не двигаться и не разговаривать до окончания измерения.

技术要求:

- 1、黏合不可露胶
- 2、保持印刷面板上的清洁
- 3、注意套印的准确性
- 4、表面处理不可爆开
- 5、颜色参考:

广东乐心医疗电子股份有限公司

2017-07-13

受控文件

产品型号	TMB-1491-7		材质	128g 铜版纸		零件名称 P0#2B2479-TMB-1491-7-GB-04-快速指引-A0	
产品名称	血压计		尺寸	105*140 mm			
对应结构图纸	-		印色	单黑			
	比例	1:1	表面处理	-		零件图号 TMB-1491-7-GB-04	
	单位	mm	设计	李秋燕 2017-07-13			
Transtek 广东乐心医疗电子股份有限公司			审核	罗佳钰 2017-07-13		共 1 张	第 1 张
			批准	谭文昊 2017-07-13		版本	A/0