



Aplicadores WTA

www.wtavet.com.br

Aplicadores - WTA



Para prolongar a vida útil deste produto leia e siga atentamente as instruções contidas neste folheto.



Alerta para instruções importantes de funcionamento.

Para informações adicionais ou esclarecer dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de assistência técnica por e-mail ou telefone.

Atendimento de segunda à sexta-feira das 7:30 às 17:00h

Telefone: (16) 3951-8161

E-mail: contato@wtavet.com.br

©WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP - Todos os direitos reservados.



+ 55 (34) 99293-0034



wtafiv.financieiro

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela escolha. Você acaba de adquirir um produto WTA, marca que agrega qualidade e tecnologia no que fabrica.

A WTA é uma empresa brasileira especializada em soluções para reprodução animal. Nossos produtos são desenvolvidos para o trabalho com bovinos, ovinos e equinos, com reconhecida aprovação pelos mais renomados especialistas do mundo.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Os Aplicadores WTA possuem travamento rápido e automático da bainha. São fabricados em aço inox com acabamento em alumínio ou ABS, fáceis de usar, desmontar e limpar. Proporcionam segurança e higiene para o trabalho profissional.

UTILIZAÇÃO

Insira a bainha completamente até o final - ouvir um “click”. Antes de usar verifique se o travamento foi bem sucedido. Para remover a bainha pressione o “gatilho de liberação” e retire-a completamente.

LIMPEZA


Utilize etanol 70% ou solução com água e detergente neutro para a higienização dos componentes plásticos e metálicos. Não use água fervente (pode empenar a haste ou deformar o corpo do dispositivo).



Eventualmente restos de polímeros das bainhas podem se acumular no interior do corpo e dificultar o travamento da bainha. Para limpar o interior do dispositivo, desenrosque a seção posterior e retire os resíduos. (cuidado para não danificar a mola ou perder a arruela interna).

Proceda a abertura do disposto somente quando necessário para evitar o desgaste prematuro das roscas.

Conserve o dispositivo na horizontal e evite sobrepor objetos pesados a fim de preservar suas características.

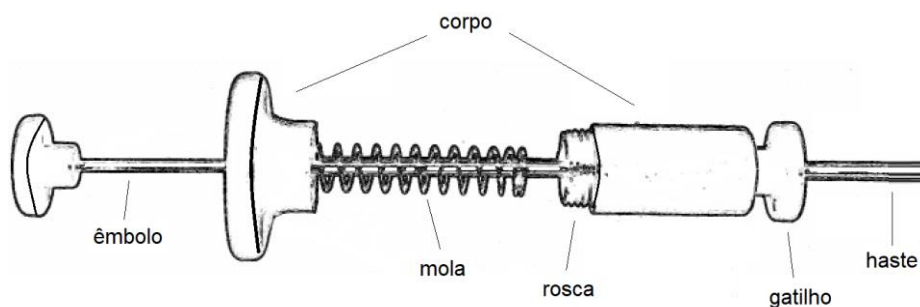

GARANTIA

A WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP segue rigorosas normas internas de controle da qualidade na fabricação de seus produtos. Além da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no Código de Defesa do Consumidor, assegura aos seus clientes Garantia Adicional de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, contra o desgaste natural e desde que o dispositivo tenha sido utilizado conforme as orientações contidas neste folheto.

Aplicadores – WTA

Imagens contidas são meramente ilustrativas.

Images contained are merely illustrative.

Todos os direitos reservados | All rights reserved

