

PM TRANS SET/MINI/OLIVE

Set de transferencia de embriones

Estéril - Un sólo uso

PRESENTACIÓN: Caja de 10 unidades, en envase estéril individual

1) Descripción

Los PM TRANS SETS incluyen 2 catéteres:

- Una vaina o camisa graduada de introducción en polipropileno (en el interior de la cual se coloca un estilete que puede preformarse)
- Un catéter de transferencia en polietileno.

Los catéteres de transferencia tienen un anillo deslizante de marcado ajustable (en polietileno).

PM TRANS SET OLIVE (PS3800317) es un catéter de transferencia con una bola de polietileno en su extremo que permite un uso atraumático y confiable incluso en condiciones anatómicas difíciles.

Los materiales, la fabricación y la esterilización han sido validados con pruebas de supervivencia en embriones de ratones para obtener la máxima fiabilidad.

2) Referencias y Características

Referencia	Catéter de Transferencia Diámetro Externo / CH	Diámetro Interno / Volúmen	Catéter camisa Longitud útil	Catéter camisa Diámetro Externo / CH	Catéter de Transferencia Longitud excedente	Estilete
PS1300317	1mm / CH3	0,6mm / 0,10 ml	175mm	1,6mm / CH5	28mm	SI
PS1310517	1,5mm / CH5	1,1mm / 0,20 ml	160mm	2mm / CH6	30mm	SI
PS3800317	1mm / CH3	0,6mm / 0,10 ml	175mm	1,6mm / CH5	57mm	SI

Packaging: caja de 10 unidades en envase estéril individual.

Método de Esterilización: Radiación gamma

3) Indicaciones

Los catéteres PM TRANS SET permiten la transferencia de embriones después de una fertilización in vitro. Para otras aplicaciones, asegúrese de que este dispositivo sea compatible con esta nueva aplicación.

4) Recomendaciones

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.
- Este dispositivo médico solo debe ser utilizado por personal médico capacitado y calificado o persona autorizada, familiarizada con exploraciones ginecológicas, familiarizadas con las patologías en cuestión, así como sus posibles complicaciones (bajo la responsabilidad del profesional).

NO UTILICE el dispositivo si su paquete ha sido abierto o dañado o si muestra algún defecto causado por el transporte o condiciones de almacenamiento incorrectas o una manipulación incorrecta que pueda afectar negativamente su uso.

5) Condiciones de Almacenamiento

Para evitar cualquier daño, los productos deben almacenarse en su embalaje original, en un lugar fresco y seco.

6) Preparación del uso del material

- Los PM TRANS SETS se entregan ESTÉRIL y para UN SOLO USO.
- Asegúrate de que el dispositivo esté intacto.
- Asegúrese de que el embalaje esté intacto y de que la vida útil no haya expirado, ya que estos aspectos garantizan la esterilidad y la calidad del producto.
- Abra la bolsa quitando el papel por el lugar marcado.
- Coloque el anillo del catéter de introducción PM TRANS SET (graduación centimétrica) de acuerdo con la longitud del útero.
- Preformar el catéter de introducción con su estilete si es necesario, luego insertarlo en el canal del cuello uterino
- Retire el estilete.
- Inserte el catéter de transferencia precargado con embriones, en el catéter camisa de introducción y presione hasta llegar a la zona de transferencia -
- Las extremidades distales de los dos catéteres (ambas puntas) coinciden cuando la primera marca en catéter de transferencia está a la altura de la entrada en la base del catéter de introducción.
- Proceda a la transferencia.
- Retire PM TRANS SET de acuerdo con las reglas de asepsia.

7) Eliminación del producto después del uso

Después del uso, deseche el producto y su embalaje de acuerdo con los procedimientos vigentes en su establecimiento para el tratamiento de desechos médicos.

Le recordamos que estos productos son dispositivos estrictamente desechables que no se pueden volver a usar. En caso de reutilización, sus desempeños podrían verse afectados por un importante riesgo de contaminación.

*** USO INDIVIDUAL - NO REUTILIZAR ***

8) Significados de los símbolos utilizados en las etiquetas.

										Lote
Cantidad por caja	Sin Látex	Instrucciones de uso	Un sólo uso	Solo uso profesional	Conservar en lugar fresco	No usar si el empaque está dañado	Mantener en lugar seco	Fecha de fabricación	Fecha de Caducidad	Número de Lote

Producto aprobado por la A.N.M.A.T. PM 2148-2

Fabricado por: Prince Medical
64 rue Gutenberg - 60530 ERCUIS - FRANCIA

Importa y Distribuye: Federal Med S.A.
Av. Santa Rosa 2176, Ituzaingó, Buenos Aires - Argentina
TE: (54-11) 4661-8788
www.reproductiva.com.ar - info@reproductiva.com.ar

Director Técnico: Alberto S. Valoggia M.N. 16.785
Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias



reproductiva