

PM IU

Catéter intrauterino

Estéril - Un sólo uso

PRESENTACIÓN: Caja de 25 unidades, en envase estéril individual

1) Descripción

Los catéters PM IU incluyen:

- un tubo flexible distal en polietileno cerrado y perforado con 2 huecos laterales cerca de la punta.
- un tubo rígido proximal, graduado en polipropileno.

Los cateters se unen a una base de luer lock estándar. Para algunas referencias, el PM IU está provisto de un introductor rígido en poliestireno, que incluye un anillo en polietileno en cada extremo y / o un mandril de polietileno que cubre una varilla de acero inoxidable.

2) Referencias y Características

Referencia	Diámetro Externo / CH	Diámetro Interno / Volúmen	Longitud de la parte distal	Perforación	Introductor	Mandril
PS1260500	1,65mm / CH 5	1,1mm / 0,20 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1 mm	NO	NO
PS1260600	2,00mm / CH 6	1,6mm / 0,40 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1,3 mm	NO	NO
PS1270500	1,65mm / CH 5	1,1mm / 0,20 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1 mm	SI	NO
PS1270600	2,00mm / CH 6	1,6mm / 0,40 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1,3 mm	SI	NO
PS4130500	1,65mm / CH 5	1,1mm / 0,20 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1 mm	NO	SI
PS4130600	2,00mm / CH 6	1,6mm / 0,40 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1,3 mm	NO	SI
PS4160500	1,65mm / CH 5	1,1mm / 0,20 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1 mm	SI	SI
PS4160600	2,00mm / CH 6	1,6mm / 0,40 ml	45 mm	2 agujeros lat. Diám. 1,3 mm	SI	SI

Cada graduación representa 1 cm

Packaging: caja de 25 unidades en envase estéril individual.

Método de Esterilización: Radiación gamma

3) Indicaciones

Inseminación intrauterina artificial.

Para otras aplicaciones, asegúrese de que este dispositivo sea compatible con esta nueva aplicación.

4) Recomendaciones

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.
- Este dispositivo médico solo debe ser utilizado por personal médico capacitado y calificado o persona autorizada, familiarizada con exploraciones ginecológicas, familiarizadas con las patologías en cuestión, así como sus posibles complicaciones (bajo la responsabilidad del profesional).

NO UTILICE el dispositivo si su paquete ha sido abierto o dañado o si muestra algún defecto causado por el transporte o condiciones de almacenamiento incorrectas o una manipulación incorrecta que pueda afectar negativamente su uso.

5) Condiciones de Almacenamiento

Para evitar cualquier daño, los productos deben almacenarse en su embalaje original, en un lugar fresco y seco.

6) Preparación del uso del material

- Los catéteres se entregan ESTERILIZADOS y para UN SOLO USO.
- Asegúrese de que el dispositivo esté intacto.
- Asegúrese de que el embalaje esté intacto y la vida útil no haya expirado, ya que estos aspectos garantizan la esterilidad y la calidad del producto.
- Abra la bolsa desde el punto indicado con dos flechas.
- Introduzca el esperma en la jeringa que está conectada a un catéter PM IU.
- Realiza la inseminación
- Retirar PM IU, respetando las reglas de asepsia

Cuando se usa un catéter PM IU con un introductor:

- Coloque el insertador en el tope distal
- Introduzca el PM IU dentro del cuello uterino
- Empuje el PM IU y el introductor se moverá hacia atrás y esto facilitará la posicionamiento del catéter.

Cuando se usa un catéter PM IU con mandril:

- Preformar el catéter con su mandril si es necesario y luego introduzcalo en la cavidad uterina.
- Retire el mandril.

7) Eliminación del producto después del uso

Después del uso, deseché el producto y su embalaje de acuerdo con los procedimientos vigentes en su establecimiento para el tratamiento de desechos médicos.

Le recordamos que estos productos son dispositivos estrictamente desechables que no se pueden volver a usar. En caso de reutilización, sus desempeños podrían verse afectados por un importante riesgo de contaminación.

*** USO INDIVIDUAL - NO REUTILIZAR ***

8) Significados de los símbolos utilizados en las etiquetas.

Cantidad por caja	Sin Látex	Instrucciones de uso	Un sólo uso	Solo uso profesional	Conservar en lugar fresco	No usar si el empaque está dañado	Mantener en lugar seco	Fecha de fabricación	Fecha de Caducidad	Número de Lote

Producto aprobado por la A.N.M.A.T. PM 2148-2

Fabricado por: Prince Medical

64 rue Gutenberg - 60530 ERCUIS - FRANCIA

Importa y Distribuye: Federal Med S.A.

Av. Santa Rosa 2176, Ituzaingó, Buenos Aires - Argentina

TE: (54-11) 4661-8788

www.reproductiva.com.ar - info@reproductiva.com.ar

Director Técnico: Alberto S. Valoggia M.N. 16.785

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias



reproductiva