

Set de Punción de Ovocitos

Estéril - Un sólo uso

PRESENTACIÓN: PS3251533 Caja de 5 unidades, y PS4341533 Caja de 4 unidades

1) Descripción

Los set de punción de ovocitos incluyen:

- Una aguja biselada triple, de 315 mm de largo, que incluye dos zonas ecogénicas de un centímetro hasta su extremo, una flecha en la base luer de la aguja muestra la dirección del bisel.
- Un tubo de succión en polietileno (900 mm de largo y 1.35 mm de diámetro interno) conectado directamente a la aguja.
- Para la referencia PS4341533, se monta una válvula de 3 vías entre la aguja de punción y el luer lock que permite la aspiración o el enjuague de los folículos.
- Tubos fijados a una tapa hecha de SEBS adaptable en un tubo estándar tipo Falcon, con un diámetro interno entre 15 y 16.5 mm

2) Referencias y Características

REFERENCIAS	CARACTERISTICAS DE LA AGUJA		VALVULA DE 3 VÍAS	PACKAGING En envase individual estéril
	Diámetro Interno	Diámetro Externo		
PS3251533	1,5 mm / 17 Gauge	1,2 mm	No	Caja de 5 Unidades
PS4341533	1,5 mm / 17 Gauge	1,2 mm	SI	Caja de 4 Unidades

Método de Esterilización: Radiación gamma

3) Indicaciones

Los Set de Aguja de punción permiten realizar una punción guiada por ultrasonido de los folículos ováricos con el objetivo de la fertilización in vitro. La referencia PS4341533 también permite realizar un enjuague de folículos.

*** NO UTILIZAR PARA OTRAS APLICACIONES ***

4) Recomendaciones

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.
- Este dispositivo médico solo debe ser utilizado por personal médico capacitado y calificado o persona autorizada, familiarizada con exploraciones ginecológicas, familiarizadas con las patologías en cuestión, así como sus posibles complicaciones (bajo la responsabilidad del profesional).

NO UTILICE el dispositivo si su paquete ha sido abierto o dañado o si muestra algún defecto causado por el transporte o condiciones de almacenamiento incorrectas o una manipulación incorrecta que pueda afectar negativamente su uso.

5) Condiciones de Almacenamiento

Para evitar cualquier daño, los productos deben almacenarse en su embalaje original, en un lugar fresco y seco.

6) Preparación del uso del material

- Los sets de punción de ovocitos se entregan ESTÉRIL y para UN SOLO USO.
- Asegúrate de que el dispositivo esté intacto.
- Asegúrese de que el embalaje esté intacto y de que la vida útil no haya expirado, ya que estos aspectos garantizan la esterilidad y la calidad del producto.
- Abra la bolsa pelando el papel.
- Retire el protector de la aguja.
- Antes de su uso, se recomienda enjuagar cuidadosamente el catéter con un medio de cultivo adaptado.
- Fije el dispositivo de succión en el cono luer del tubo de succión.
- Ajuste un tubo estéril tipo Falcon en la tapa.
- Suavemente avance el dispositivo medico con una serie de pequeños empujes de intensidad en el útero para llegar al ovario.
- Realice la punción bajo ecografía.
- Enjuague la aguja y el tubo con algunos medios de cultivo (en el caso de que algunos ovocitos puedan haber permanecido).
- Retire la aguja, respetando las reglas asépticas habituales.

7) Eliminación del producto después del uso

Después del uso, deseche el producto y su embalaje de acuerdo con los procedimientos vigentes en su establecimiento para el tratamiento de desechos médicos.

Le recordamos que estos productos son dispositivos estrictamente desechables que no se pueden volver a usar. En caso de reutilización, sus desempeños podrían verse afectados por un importante riesgo de contaminación.

*** USO INDIVIDUAL - NO REUTILIZAR ***

8) Significados de los símbolos utilizados en las etiquetas.

				Rx						Lote
Cantidad por caja	Sin Látex	Instrucciones de uso	Un sólo uso	Solo uso profesional	Conservar en lugar fresco	No usar si el empaque está dañado	Mantener en lugar seco	Fecha de fabricación	Fecha de Caducidad	Número de Lote

Producto aprobado por la A.N.M.A.T. PM 2148-3

Fabricado por: Prince Medical
64 rue Gutenberg - 60530 ERCUIS - FRANCIA

Importa y Distribuye: Federal Med S.A.
Av. Santa Rosa 2176, Ituzaingó, Buenos Aires - Argentina
TE: (54-11) 4661-8788
www.reproductiva.com.ar - info@reproductiva.com.ar

Director Técnico: Alberto S. Valoggia M.N. 16.785
Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias



reproductiva