

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ПИСАЛКА ПРОТИВ ГЪБИЧКИ ПО НОКТЕТЕ

Област на приложение: Медицинско изделие за подобряване на структурата на ноктите при микробиологично увреждане.

Състав:

Вода, етоксидигликол, урея, бензил алкохол, пентилен гликол, глицерин, PEG-40 хидрогенирано касторово масло, тридецет-9, РЦР, ксантанова гума, пропилен гликол, етерични масла.

Ръководство за употреба:

Завъртете края на писалката, така че течността да стане видима върху апликатора. Нанасяйте течността през период от 4 седмици 2 пъти на ден върху чистия сух нокът. Уверете се, че целият нокът бива покрит. Оставете продукта да изсъхне 1-2 минути, преди да обуе чорапи или обувки.

След това продължете да обработвате ноктя веднъж на ден, докато израсте изцяло новият здрав нокът (8-10 месеца).

Да се прилага при първите признаци на инфекция.

Общи предпазни мерки:

След използване капачето на писалката да се затвори плътно. Съхраняване при стайна температура. Подходящ само за локално външно приложение. В случай на алергична реакция трябва да се потърси лекар. Да се съхранява извън обсега на деца.

Съдържание: 4 ml.

Срок на годност: виж печат



Номер на партида



Да се използва до



Да се съблюдава указанието за употреба



0086 Медицинско изделие.



Производител: Дистрикон ГмбХ
ул. Ам Йозеф 15
D-61273 Верхайм

Вносител и дистрибутор за България:

Ти Ейч Би Дистрибушън ООД
ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1
Варна 9009
Тел: +359 52 731 187
www.s-o-s-bulgaria.com

Дата на последната актуализация на информацията: Юли 2017 г.